


# Anwendung des Detektor CANCER01


(Bitte beachten sie auch die Gebrauchsanweisung)

## Legen der Verweilkanüle


BD Venflon Kanüle, 20 G, 32 mm, Luer-Lock empfohlen

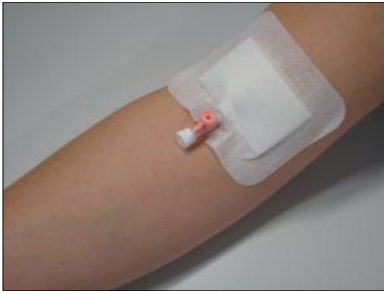

## Entfernung der Nadel

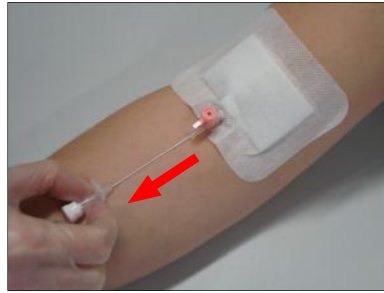

## Verschließen der Verweilkanüle

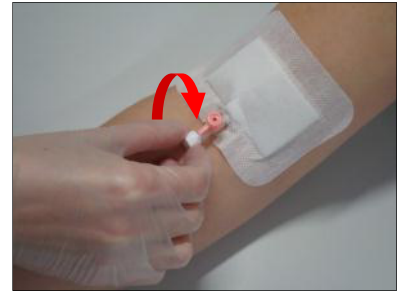

## Detektor aus der Verpackung entnehmen



## Sterilen Detektor aus dem Glasröhrchen entnehmen




## Roten Stopfen abdrehen



## Abschrauben des Verschlusses an der Verweilkanüle




## Detektor mit goldener Spitze mittig in Verweilkanüle einbringen

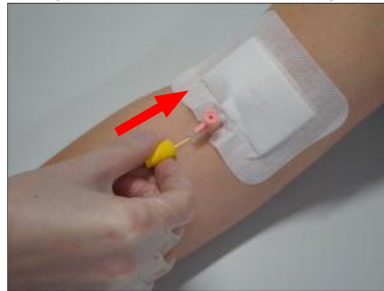


## Detektor mittels IN-Stopfen auf Luer-Lock der Verweilkanüle fixieren




## Detektor vorsichtig bis zur 1. Markierung vorschieben

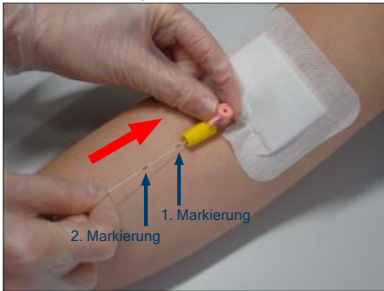


## Zur 2. Markierung in Vene schieben, STOPP bei Unannehmlichkeiten

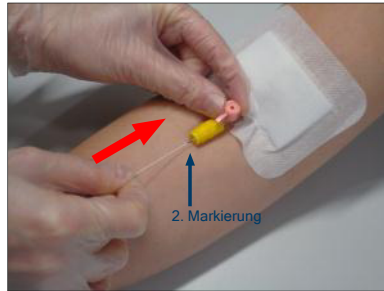

## Anwendungszeit: In dieser Zeit Waschen und Fixieren vorbereiten

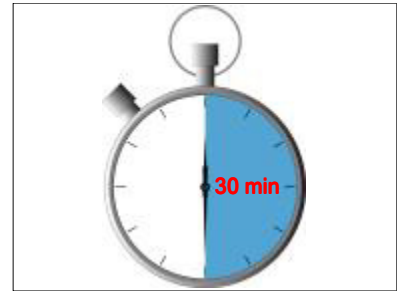

## Detektor vorsichtig zurückziehen bis beide Markierungen sichtbar sind

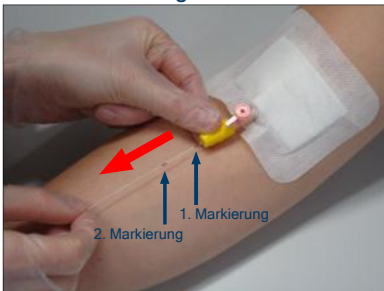

## Detektor mit IN-Stopfen abdrehen und Verweilkanüle verschließen



## Achtung: **Unverzüglich** weiter mit Waschen und Fixieren

