

# Waschen und Fixieren des Detektor CANCER01

(mit den Lösungen des Nachbehandlungssets)

Detektor in „Wasch 1“ tauchen und zwischen den Fingern leicht zwirbeln




Währenddessen: Mit Wattestäbchen IN-Stopfen von Blut befreien



Wiederholung des Waschschrtes in „Wasch 2“




Wiederholung in „Wasch 3“ bis kein Blut mehr am Detektor sichtbar ist

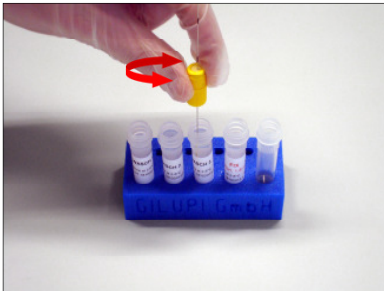


Gewaschenen Detektor in Fix-Lösung stellen




**Fixierungszeit:**

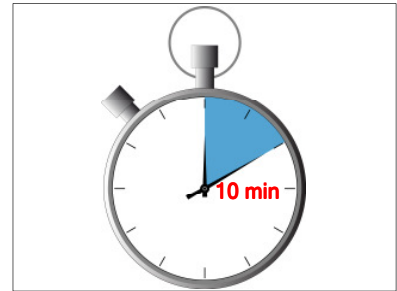

Anschließend im leeren Rörchen trocknen lassen

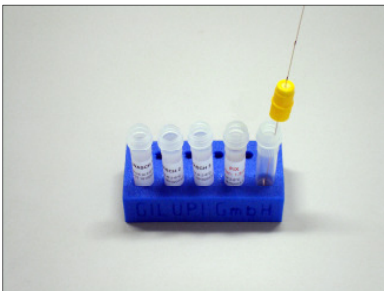

**Trocknungszeit:**

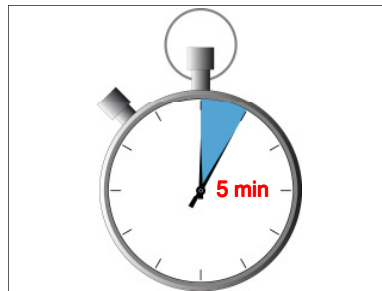


Weiter mit:

**Versand 1**  
oder  
**Versand 2**


**Versand 1: Versand am gleichen Tag**

Aufrechter Versand bei **Raumtemperatur**

Laborlösung vollständig ins Glasrörchen überführen

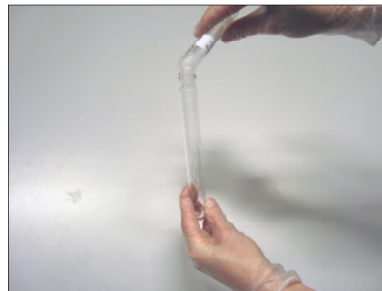

Detektor mit Goldspitze voran ins Rörchen geben, aufrecht versenden

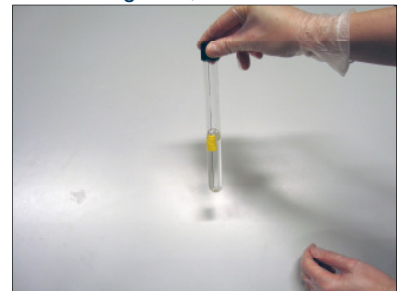

**Versand 2: Versand nicht am gleichen Tag**

Versand **gefroren**  
(Kühlakku bei -20°C lagern)  
oder auf Trockeneis (nach  
Absprache mit GILUPI)

Detektor mit Goldspitze voran in leeres Glasrörchen geben



**Unverzüglich** Detektor bis zum Versenden **bei -20°C einfrieren**

